


*Dit document is geen vervanging voor een doktersadvies. Bij Corona/Covid-19 gerelateerde klachten of bij twijfel hierover, raadpleeg een huisarts of medisch professional. Covid-19 symptomen kunnen anders zijn dan hieronder omschreven. Sommige patiënten hebben geen enkel hieronder beschreven symptoom en hebben toch het Corona virus.*



Patiënt is niet ziek. Is niet verkouden, heeft geen koorts, geen droge hoest, geen keelpijn, geen reuk- of smaakverlies. Patiënt heeft ook recentelijk geen koorts gehad, geen keelpijn, hoest of verkoudheid.

**Een antigeen sneltest uitvoeren is zinvol, als je 5 - 7 dagen geleden in contact bent geweest met een besmet persoon.**

Testuitslag alleen een c-lijn.

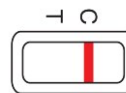


De c-lijn geeft aan dat de test correct is gedaan. Indien er geen t-lijn verschijnt heeft de patiënt geen corona virus of is de concentratie onder de drempelwaarde van de test. De uitslag is negatief.

Patiënt heeft sinds enkele dagen een droge hoest, keelpijn, koorts, reuk- of smaakverlies of is verkouden.

**Een antigeen sneltest uitvoeren is **zinvol**. Doe zo snel mogelijk een test.**

Testuitslag c-lijn en t-lijn.

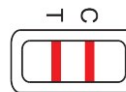


De patiënt is besmet met het Corona virus. Meld het bij de huisarts en vraag eventueel een pcr test aan. De uitslag is positief.

Patiënt heeft al langer dan 2 à 3 weken een "droge" hoest, keelpijn of koorts, reuk- of smaakverlies, benauwd of is verkouden.

**Een antigeen sneltest uitvoeren is mogelijk **niet** zinvol. Vraag een pcr test aan bij GGD.**

Testuitslag alleen een c-lijn.

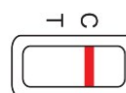


De c-lijn geeft aan dat de test correct is uitgevoerd. Indien er geen t-lijn verschijnt is de patiënt mogelijk niet besmet met het Corona virus, of is de concentratie antigenen te laag voor de drempelwaarde van de test. Klachten kunnen ook worden veroorzaakt door een seizoensgriep of verkoudheid anders dan het Corona virus. Vraag een pcr test aan bij GGD.

Patiënt heeft een lichte verkoudheid, griep, koorts of hoestklachten gehad maar is hiervan hersteld.


**Als de covid-19 gerelateerde klachten al dagen of weken zijn verdwenen, kun je een covid-19 antistoffen test overwegen.**

Testuitslag c-lijn en t-lijn.

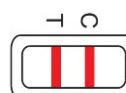


De patiënt is besmet met het Corona virus. Meld het bij de huisarts en vraag eventueel een pcr test aan. De uitslag is positief.

Testuitslag alleen een c-lijn.

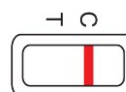

De c-lijn geeft aan dat de test correct is uitgevoerd. De uitslag is negatief. Zonder t-lijn heeft de patiënt waarschijnlijk niet het Corona virus, of is de concentratie te laag voor de drempelwaarde van de test. Vraag een pcr test aan bij de GGD.

Testuitslag c-lijn en t-lijn.

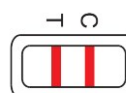

De patiënt is besmet met het Corona virus. Meld het bij de huisarts en vraag eventueel een pcr test aan. De uitslag is positief.