



Snel aan de slag met de Ovulatie-test (LH)

Wanneer kun je beginnen met ovulatie-testen? Gebruik de ovulatie-test (LH) om de dag te bepalen dat je de grootste kans hebt om zwanger te worden. Om de startdag te bepalen voor de ovulatie-test, check Tabel 1 in de bijsluiting van het pakket.

Vorbereiding voor de eerste ovulatie-test. Haal de folie-verpakking met de Monitor uit het doosje. De folie heeft een label met de tekst HDR500 Monitor.

Stap 1. Pak een folieverpakking met de tekst **LH**. Haal de teststick uit de verpakking.



Stap 2. Plaats de teststick in de Monitor totdat je een klik voelt. De Monitor laat een paar piepjes horen en op het scherm knippert **HCG** en **LH**. Na enkele ogenblikken piept de Monitor weer en geeft de display de tekst **LH** continu weer.



Stap 3. Vang wat urine op in een schoon en droog bekertje en houd de absorberende tip van de test in de urine gedurende 20 seconden. De test mag niet dieper in de urine dan de rode lijn op de tip aangeeft. Op de display begint de tekst **LH** te knipperen. Houd de test **niet** met de tip omhoog. Plaats de Monitor op een vlakke ondergrond met de display naar boven.

- 20 seconden
- tot de rode lijn



• tip niet omhoog houden

Stap 4. Wacht circa 5 minuten op het testresultaat. Haal tijdens het wachten de teststick niet uit de Monitor.

Stap 5. De Monitor piept verschillende keren als hij klaar is en het testresultaat weergeeft. De display geeft één van de volgende testresultaten weer:



Bekijk de betekenis van je testresultaat in Tabel 2 van de bijsluiting.

Stap 6. Verwijder de teststick uit de Monitor door op de witte eject-knop te duwen. De stick mag bij het huishoudelijk afval. De Monitor mag worden opgeborgen tot de volgende test.

Snel aan de slag met de Zwangerschapstest (HCG)

Wanneer kun je beginnen met zwangerschapstesten? In principe krijg je de meest betrouwbare testuitslag als je de zwangerschapstest (HCG) uitvoert vanaf de dag dat je overtuigd bent. Ga je vóór die datum testen met de zwangerschapstest, bewaar dan altijd 1 test voor de dag dat je overtuigd bent.



Vorbereiding voor de eerste zwangerschapstest. Als je de Monitor nog niet hebt gebruikt bij de ovulatie-testen, haal je de folieverpakking met de Monitor uit het doosje. De folie heeft een label met de tekst HDR500 Monitor.

Stap 1. Pak een folieverpakking met de tekst **HCG**. Haal de teststick uit de verpakking.



Stap 2. Plaats de teststick in de Monitor totdat je een klik voelt. De Monitor laat een paar piepjes horen en op het scherm knippert **HCG** en **LH**. Na enkele ogenblikken piept de Monitor weer en geeft de display de tekst **HCG** continu weer.

Stap 3. Vang wat urine op in een schoon en droog bekertje en houd de absorberende tip van de test in de urine gedurende 20 seconden. De test mag niet dieper in de urine dan de rode lijn op de tip aangeeft. Op de display begint de tekst **HCG** te knipperen. Houd de test **niet** met de tip omhoog. Plaats de Monitor op een vlakke ondergrond met de display naar boven.

Stap 4. Wacht circa 5 minuten op het testresultaat. Haal tijdens het wachten de teststick niet uit de Monitor.

Stap 5. De Monitor piept verschillende keren als hij klaar is en het testresultaat weergeeft. De display geeft één van de volgende testresultaten weer:



Bekijk de betekenis van je testresultaat in Tabel 2 van de bijsluiting.

Stap 6. Verwijder de teststick uit de Monitor door op de witte eject-knop te duwen. De stick mag bij het huishoudelijk afval. De Monitor mag worden opgeborgen tot de volgende test.