



Snel aan de slag met de Ovulatie-test (LH) Digital

Wanneer kun je beginnen met ovulatie-testen? Gebruik de ovulatie-test (LH) om de dag te bepalen dat je de grootste kans hebt om zwanger te worden. Om de startdag te bepalen voor de ovulatie-test, check Tabel 1 in de bijsluiters van het pakket.

Wat heb je nodig:

- De verpakking met de Monitor (folie HDR500 monitor)
- Een folie verpakking LH
- De urine van de vrouw waarbij de LH piek vastgesteld moet worden.

Stap 1. Vang wat urine op in een schoon en droog bekertje.

Stap 2. Pak een folieverpakking met de tekst **LH**. Haal de teststick uit de verpakking. Haal ook de monitor uit de verpakking.



Stap 3. Plaats de teststick met de letters **LH** naar boven in de Monitor totdat je een klik voelt. De Monitor laat 3 piepjes horen en op het scherm knippert **HCG** en **LH**. Wacht enkele ogenblikken tot de Monitor nogmaals 3 keer piept en de display de tekst **LH** continu weergeeft. De monitor is klaar om de test uit te voeren.



Stap 4. Houd de absorberende tip van de test in de urine gedurende 20 seconden. Je kunt ook gedurende 20 seconden de tip van de stick in je urinestraal houden. Op de display begint de tekst **LH** te knipperen. Houd de test **niet** met de tip omhoog. Plaats de Monitor op een vlakke ondergrond met de display naar boven.

- 20 seconden
- tip in de urine



- tip niet omhoog houden

Stap 5. Wacht circa 5 minuten op het testresultaat. Haal tijdens het wachten de teststick niet uit de Monitor.

Stap 6. De Monitor piept 3 keer als hij klaar is en het testresultaat weergeeft. De display geeft één van de volgende testresultaten weer:



Bekijk de betekenis van je testresultaat in Tabel 2 van de bijsluiters.

Stap 7. Verwijder de teststick uit de Monitor door op de witte eject-knop te duwen. De stick mag bij het huishoudelijk afval. De Monitor mag worden opgeborgen tot de volgende test.



Snel aan de slag met de Zwangerschapstest (HCG)

Wanneer kun je beginnen met zwangerschapstesten? In principe krijg je de meest betrouwbare testuitslag als je de zwangerschapstest (HCG) uitvoert vanaf de dag dat je overtijd bent. Ga je vóór die datum testen met de zwangerschapstest, bewaar dan altijd 1 test voor de dag dat je overtijd bent.



Wat heb je nodig:

- De verpakking met de Monitor (folie HDR500 monitor)
- Een folie verpakking HCG
- De urine van de vrouw waarbij een zwangerschap vastgesteld moet worden.

Stap 1. Vang wat urine op in een schoon en droog bekertje.

Stap 2. Pak een folieverpakking met de tekst **HCG**. Haal de teststick uit de verpakking. Haal ook de monitor uit de verpakking.



Stap 3. Plaats de teststick met de letters **HCG** naar boven in de Monitor totdat je een klik voelt. De Monitor laat 3 piepjes horen en op het scherm knippert **HCG** en **LH**. Wacht enkele ogenblikken tot de Monitor nogmaals 3 keer piept en de display de tekst **HCG** continu weergeeft. De monitor is klaar om de test uit te voeren.

Stap 4. Houd de absorberende tip van de test in de urine gedurende 20 seconden. Je kunt ook gedurende 20 seconden de tip van de stick in je urinestraal houden. Op de display begint de tekst **HCG** te knipperen. Houd de test **niet** met de tip omhoog. Plaats de Monitor op een vlakke ondergrond met de display naar boven.

Stap 5. Wacht circa 5 minuten op het testresultaat. Haal tijdens het wachten de teststick niet uit de Monitor.

Stap 6. De Monitor piept 3 keer als hij klaar is en het testresultaat weergeeft. De display geeft één van de volgende testresultaten weer:



Bekijk de betekenis van je testresultaat in Tabel 2 van de bijsluiters.

Stap 7. Verwijder de teststick uit de Monitor door op de witte eject-knop te duwen. De stick mag bij het huishoudelijk afval. De Monitor mag worden opgeborgen tot de volgende test.