

Speeksel Drugstest voor snelle afname

AANWIJZINGEN VOOR DE AFNAME VAN DE DRUGSTEST.

De drugstest voor mond/speeksel afname kan 6 verschillende typen drugs meten in het speeksel. Afhankelijk van de tijdsduur sinds de laatste inname/gebruik van de drugs kan het gebruik ervan worden gedetecteerd. Hieronder enkele tips die de kans op een correcte testuitslag vergroten.

Toepassing van de test:

AMP	Amphetamine
COC	Cocaine
MDMA	Methyleen-dioxymethamfetamine (ecstasy of xtc)
METH	Methamfetamine (crystal meth)
OPI	Opiaten Morfine
THC	Marihuana



- **Tip 1.** Gebruik de test op kamertemperatuur (15-30 graden Celsius).
- **Tip 2.** Gebruik de test uitsluitend uit een gesloten verpakking. Open de verpakking vlak voor afname van de test.
- **Tip 3.** Houd de spons/tip gedurende **3 minuten** in de mond.
- **Tip 4.** Na het terugplaatsen van het sponsje in de testbeker, stevig aandraaien en **wacht 10 minuten** voor het aflezen van het testresultaat.
- **Tip 5.** Let op dat bij het aflezen van het testresultaat geldt:

Testuitslag: **2 streepjes** Negatief (drug type niet aangetroffen in speeksel)

Testuitslag: **1 streepje** Positief (drug type aangetroffen in speeksel)



Opmerking: De testuitslag is dus omgekeerd in vergelijking met de werking van een zwangerschapstest of covid sneltest.

Ten slotte: Hoewel de test een zeer hoge nauwkeurigheid heeft, is er een kleine kans op een verkeerde testuitslag. Het is mogelijk dat een te kleine concentratie van een bepaald type drug niet wordt waargenomen, waardoor de test een negatieve testuitslag geeft. We spreken dan van een vals-negatieve testuitslag. Het is niet uitgesloten dat de test zou kunnen reageren op een stof waarvoor hij niet is ontwikkeld. We spreken dan van een vals-positieve testuitslag. Bij twijfel over de testuitslag is aan te raden om de test te herhalen of om een laboratorium test te laten uitvoeren.