

Sensitest Color Display Thermometer

SNELLE HANDLEIDING VOOR DE KFT-05

De snelle kleurendisplay thermometer kan in 10 seconden een temperatuurmeting vaststellen. Deze snelle handleiding is geen vervanging voor de originele handleiding. Lees voor gebruik de waarschuwingen van de fabrikant in de originele handleiding.



Toepassing van de thermometer:

Plaats	oraal, rectaal
Waterprooflevel	ip55
Temperatuurbereik	32,00 – 42,99 graden Celcius
Auto shut-off	na 5 minuten
Batterij	DC 3v, CR1632
Batterijduur	Circa 600 metingen
Gebruikstemperatuur	5-40 graden Celcius

- **Voor de eerste meting:** Verwijder het on/off-kapje aan het uiteinde van de thermometer. Trek de batterijfolie los waardoor de thermometer aan gaat.
- **Meting in de mond of oksel:** Niet praten tijdens de meting. Houd de mond gesloten. Niet bewegen. Na bad, douche, drinken, eten, roken of sportieve inspanning wacht 30 minuten voordat je een meting doet.

Hoe werkt de thermometer

1. **Druk op de on/off knop** de thermometer piept en de display geeft de laatst gemeten temperatuur weer uit het geheugen. Achter de temperatuur verschijnt een 'm'.
2. **De thermometer geeft 'Lo' weer** de thermometer is klaar voor de meting
3. **Voer de meting uit**
4. **De thermometer piept** zodra de meting is voltooid. De display geeft de gemeten temperatuur weer.
5. **De achtergrond kleur is groen** temperatuur 36.00 – 37.29 graden Celcius
6. **De achtergrond kleur is blauw** temperatuur 32.00 – 35.99 en 37.30 – 37.99 graden Celcius
7. **De achtergrond kleur is rood** temperatuur 38.00 – 42.99

Veel gestelde vragen over de Kleuren Display Thermometer

Wat betekent 'Lo' op de display? Dit betekent niet dat de batterij leeg is. De gemeten temperatuur is onder de 32 graden. Ben je bezig met een temperatuurmeting van het lichaam zoek dan een andere plek voor de meting.

Hoe kan ik de piep uitschakelen? Als de thermometer is uitgeschakeld houd de on/off knop gedurende 3 seconden ingedrukt. Er verschijnt 'ON' op de display. Druk nogmaals kort op de on-off knop tot er 'OFF' staat, het koortsalarm/piep is nu uitgeschakeld.

De thermometer werkt niet? Verwijder de batterijfolie onder het on-off kapje. Als de thermometer lang niet is gebruikt kun je de batterij vervangen van het type CR1632.